


PROPULSE®

Niezawodny system irygacji uszu

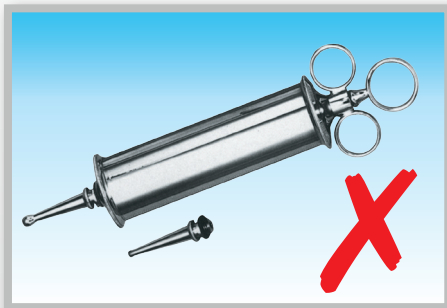

Badania przeprowadzone w Europie wykazały liczne powikłania po zabiegu usuwania woskowiny usznej przy użyciu strzykawki. Zaobserwowano poniższe komplikacje:

- podczas 29% zabiegów nie udaje się usunąć woskowiny,
- wywołanie zapalenia ucha środkowego 17%,
- uszkodzenie błony bębenkowej - perforacja 15%,
- uraz przewodu słuchowego zewnętrznego 11%.

(British Medical Journal 06 lipca 2002)

"Jak uniknąć perforacji błony bębenkowej?

Poprzez zastosowanie elektronicznego irygatora, który stanowi bezpieczną alternatywę dla zabiegów płukania uszu za pomocą strzykawki."

(Artykuł Instytutu Medycyny Ogólnej we Frankfurcie, Kwiecień 2011, www.jeder-fehler-zaehlt.de)

Elektroniczny system irygacji ProPulse® jest najczęściej wybierany przez personel brytyjskiej służby zdrowia od 1995 roku. Aparat ProPulse® z opatentowanym mechanizmem zabezpieczającym Contrapulse® jest używany przez 95% praktyk lekarskich.

Propulse® wyznacza nowe standardy w wykonywaniu zabiegów irygacji uszu. Opatentowane i unikalne właściwości przyrządu składają się na bezpieczny, wygodny i przyjazny pacjentowi system irygacji uszu.



Innovative vision, solutions for life

Mirage Health Group Ltd.,
BioPark Hertfordshire, Broadwater Road,
Welwyn Garden City, Hertfordshire. AL7 3AX GB
Tel. ++44 1707 356 139

Votre revendeur :

www.propulse.pl

Zestaw produktów do irygacji uszu



KIT4001 Elektroniczny irygator do uszu ProPulse® NG , jednorazowe końcówki ProPulse QrX - ilość 10 sztuk, pedał nożny, instrukcja obsługi, zasilacz, wewnętrzny akumulator. Dzięki systemowi zmiennego ciśnienia ProPulse wytwarza łatwo sterowany strumień wodny.



KIT4002 ProPulse® QrX™ Jednorazowe końcówki - ilość 100 sztuk. Przeznaczone do użycia wyłącznie z irygatorem ProPulse® NG. Bezpieczne w użyciu - ich specyficznie ukształtowana w "X" podstawa sprawia, że końcówka jest mocno przytwierdzona do rączki urządzenia w 4 możliwych pozycjach.




CL0001 Tabletki czyszczące ProPulse® - ilość 200 sztuk. Wygodne i łatwe w użyciu. Stosuje się jedną tabletkę dziennie, przed użyciem urządzenia. Tabletki czyszczące Chlor-Clean zaprojektowano specjalnie do oczyszczania irygatorów ProPulse®.



INS0028 Łyzeczka do usuwania woskowiny ProPulse® ProScoop - ilość 50 sztuk. Koniec łyżeczki zaprojektowany został przez specjalistów z branży opieki nad narządem słuchu, by umożliwić łatwe usunięcie woskowiny.



KIT1012 Peleryna wodoodporna ProPulse® ProTectShoulder Cape - ilość 36 sztuk. Trzywarstwowa struktura pelerynki jest połączeniem niezwykle chłonnego papieru, z wodoodporną warstwą spodnią, co zapewnia maksymalną ochronę.

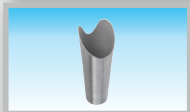

INS0021 Naczynie sanitarne ProPulse® NootsTank do zbierania wody oraz pozostałości po zabiegu.



INS0014 Lampa czołowa ProPulse® Headlamp. Umożliwia personelowi medycznemu łatwy ogląd przewodu słuchowego w trakcie zabiegu. Wąski promień światła żarówki ksenonowej o mocy 6000 kandeli.



KIT1005 Etui ProPulse® Carry Case . Zaprojektowane do przenoszenia całego zestawu do irygacji uszu ProPulse®. Zapobiega uszkodzeniu irygatora ProPulse® podczas transportu. Znakomite w przypadku wizyt w domu pacjenta.



KIT4099 Zestaw startowy ProPulse® zawiera: elektroniczny irygator do uszu ProPulse® NG, pedał nożny, zasilacz, wewnętrzny akumulator, instrukcję obsługi, etui ProPulse® Carry Case, jednorazowe końcówki QrX™ - ilość 100 sztuk, tabletki czyszczące ProPulse® - ilość 200 sztuk, łyżeczka do usuwania woskowiny ProPulse® ProScoop - ilość 50 sztuk, pelerynka wodoodporna ProPulse® ProTectShoulder Cape - ilość 36 sztuk, lampa czołowa ProPulse® Headlamp, naczynie sanitarne ProPulse® NootsTank.

www.propulse.pl